



SG DEVELOPMENT & DISTRIBUTION
Votre partenaire en Solutions Médico-Esthétiques :
Développez votre expertise

DECOBLEND & LAMPE SUR PIEDS

**Solution complète d'électrolyse
de précision**



BROCHURE

DECOBLEND & LAMPE SUR PIEDS

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR L'ÉLECTRO-ÉPILATION DE PRÉCISION

La solution combinée DECOBLEND + lampe loupe avec pied a été conçue pour offrir aux professionnel(le)s de l'esthétique un environnement de travail optimal pour l'électro-épilation à l'aiguille.

Elle associe un dispositif d'électro-épilation précis et performant à un système d'éclairage grossissant, indispensable pour garantir une visibilité parfaite du follicule pileux et une précision maximale du geste.

Cette combinaison permet d'assurer des traitements efficaces, progressifs et durables, dans des conditions de confort et de sécurité optimales.



DECOBLEND

Electrolyse

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le DECOBLEND est un dispositif d'électro-épilation à l'aiguille permettant un traitement efficace et progressivement définitif des poils indésirables, avec une perception minimale de la douleur. DECOBLEND repose sur la combinaison automatique de deux courants : un courant de radiofréquence (thermolyse), un courant de basse tension en courant continu (électrolyse).

L'émission de ces courants de faible intensité permet de tirer parti des effets positifs des deux méthodes :

l'effet thermique caractéristique de la thermolyse et l'effet cautérisant propre à l'électrolyse. Grâce au mélange des deux courants, l'électro-épilation offre des résultats plus efficaces et durables, entraînant une atrophie progressive du bulbe jusqu'à sa nécrose complète.

PROCÉDURE DE TRAITEMENT

Pour réaliser un traitement d'électro-épilation avec le système DECOBLEND, l'opérateur remet l'électrode de masse au sujet traité et, à l'aide de la pièce à main porte-aiguille spécifique, insère l'aiguille fine à usage unique dans le canal pileux. Le courant est délivré au niveau du follicule, incliné d'environ 75° par rapport à la surface de la peau. L'émission du courant est contrôlée par la pédale fournie avec l'appareil.

À la fin du passage du courant, l'aiguille est retirée du canal pileux et le poil est extrait à l'aide d'une pince.

BÉNÉFICES DU TRAITEMENT DECOBLEND

- Électrocoagulation douce des poils indésirables
- Épilation adaptée à tous les types et couleurs de poils
- Épilation longue durée
- Épilation à l'aiguille sûre et efficace sur toutes les zones du corps

DECOBLEND

Electrolyse



AC0667/32
Poignée
porte-aiguille



AC0665
Câble
d'électrode



AC0661
Câble
d'alimentation



AC0672
Électrode



AC0669
Câble



AC0668
Pédale
de commande

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Description du produit : Électro-épilateur à aiguille à usage esthétique

Code produit : DEC 32

Catégorie : Épilateurs électriques et électroniques

Tension d'alimentation : 230 V – 50/60 Hz

Poids net : 4 kg

Fusibles : 2 x 1 AT

Consommation maximale : 16W

Puissance de sortie maximale : 210 Vpp – 2,8 MHz – 0,5 mA (charge 10 kΩ)

Dimensions : 25x24x7cm

Minuterie : 0 à 99 minutes

Classe de protection : Classe I

Partie appliquée : Type B

LAMPE SUR PIEDS

Lampe professionnelle

DESCRIPTION DU PRODUIT

La lampe loupe avec pied est équipée d'un éclairage LED froid et d'une lentille grossissante de 5 dioptries.

Elle a été conçue pour offrir un éclairage optimal et une excellente visibilité lors des soins de précision.

Decomedical propose des lampes aux lignes simples et fonctionnelles, capables d'adopter de multiples angles grâce à leur bras articulé et adaptable.

Le travail sur le corps pour le traitement des imperfections est une activité nécessitant une grande précision ; disposer d'un éclairage adéquat est donc indispensable pour garantir des conditions de travail optimales.



AC0640
Pieds

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Nom du produit : Lampe loupe avec pied - LED 5 dioptries

Source lumineuse : Lampe LED froide

Code produit : DEC 35

Alimentation : 230 V - 50/60 Hz

Éclairage : LED

Diamètre de la lentille : 12,7 cm

Poids net : 3,7 kg

Consommation maximale : 6W

Classe de protection : Classe II



| Nous contacter

 04 23 32 42 60

 distribution_sg.professionnel

 www.distribution-sg.ch

 sg_development.distribution