



SG DEVELOPMENT
& DISTRIBUTION

Thermolyse & électrolyse

TECHNOLOGIE ELEVA



BROCHURE

ELEVA

La technologie



PRÉCISION.
PERFORMANCE.

L'électro-épilation est la seule méthode professionnelle permettant d'obtenir progressivement une épilation définitive en traitant chaque poil individuellement.

ÉLECTRO-ÉPILATION PROFESSIONNELLE

Contrairement aux technologies utilisant la lumière, le traitement consiste à insérer une fine sonde stérile dans l'ouverture naturelle du follicule pileux. Une énergie électrique contrôlée est ensuite délivrée directement au follicule, détruisant les cellules germinatives responsables de la croissance du poil tout en préservant la peau environnante.

ELEVA associe les deux modalités d'électro-épilation les plus reconnues, la Thermolyse (Flash) et le Blend, afin de permettre aux professionnels de choisir la technique la plus adaptée au poil, à la structure du follicule et à l'objectif du traitement.

Il en résulte une solution très polyvalente, adaptée aux traitements du visage et du corps, aux poils résistants, aux poils stimulés par les hormones ainsi qu'aux couleurs de poils qui ne peuvent pas être traitées efficacement par les technologies laser.

ELEVA

Une technologie avancée

ELEVA exploite la puissance des technologies Blend et Thermolyse pour offrir une précision, une efficacité et des résultats exceptionnels. Elle a été soigneusement conçue pour les professionnels exigeant performance et élégance.

Conçue pour traiter même les types de poils les plus difficiles, ELEVA garantit des résultats durables grâce à des séances réalisées avec expertise et à des protocoles cohérents.

TECHNOLOGIE AVANCÉE À DOUBLE MODE

Mode Blend : combine la thermolyse (courant de radiofréquence) et l'électrolyse (courant galvanique). Il est particulièrement adapté aux poils résistants, clairs, profonds ou fins, y compris dans les zones difficiles à traiter.

Mode Flash : utilise le courant de thermolyse. Il est particulièrement adapté aux poils très clairs, fins et moyens.

Les deux modes de fonctionnement ciblent précisément les follicules et permettent de traiter efficacement toutes les couleurs et tous les types de poils, des plus délicats aux plus profonds et résistants.

Luminosité parfaite : Eleva est également équipée d'une lampe-loupe de 5 dioptries, offrant un éclairage précis pour un travail minutieux, une meilleure visibilité et une analyse précise de la peau.



ELEVA

Les avantages de cette technologie

RÉSULTATS PROGRESSIVEMENT DÉFINITIFS

Traitement individuel de chaque follicule pour une épilation précise et progressivement définitive.

THERMOLYSE & BLEND

Deux techniques d'électro-épilation complémentaires pour chaque type de follicule et indication clinique.

POLYVALENCE COMPLÈTE DES TRAITEMENTS

Convient à toutes les couleurs de poils, à tous les phototypes et aux zones non adaptées à la photoépilation.

MÉMOIRE INTÉLLIGENTE

Enregistrez des paramètres de traitement personnalisés pour des procédures plus rapides, cohérentes et reproductibles.

ADAPTÉE À TOUTES LES COULEURS DE POILS

Une solution fiable pour les poils blancs, blonds, gris et roux qui ne peuvent pas être traités efficacement par les technologies laser.

LAMPE-LOUPE INTÉGRÉE


Une visibilité améliorée pour davantage de précision, de confort et d'exactitude pendant le traitement.



ELEVA

Comprendre le follicule pileux

L'électro-épilation permet d'obtenir une épilation progressivement définitive en ciblant le follicule à la source de la croissance du poil. Comprendre chaque étape du traitement est essentiel pour obtenir des résultats précis et efficaces.

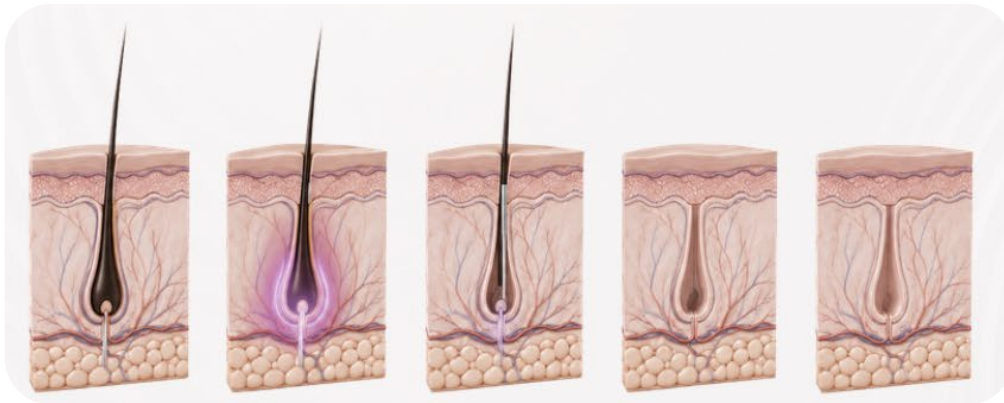

01

INSERTION

Une fine sonde stérile est délicatement insérée dans l'ouverture naturelle du follicule pileux.

02

DÉLIVRANCE DE L'ÉNERGIE

Un courant électrique contrôlé est délivré directement au follicule.

03

TRAITEMENT DU FOLLICULE

Les cellules germinatives responsables de la croissance du poil sont efficacement neutralisées.

04

RETRAIT DU POIL

Le poil traité est retiré délicatement, sans résistance.


05

RÉSULTATS PROGRESSIVEMENT DÉFINITIFS

Le follicule traité perd progressivement sa capacité à produire un nouveau poil.

ELEVA

Les applications

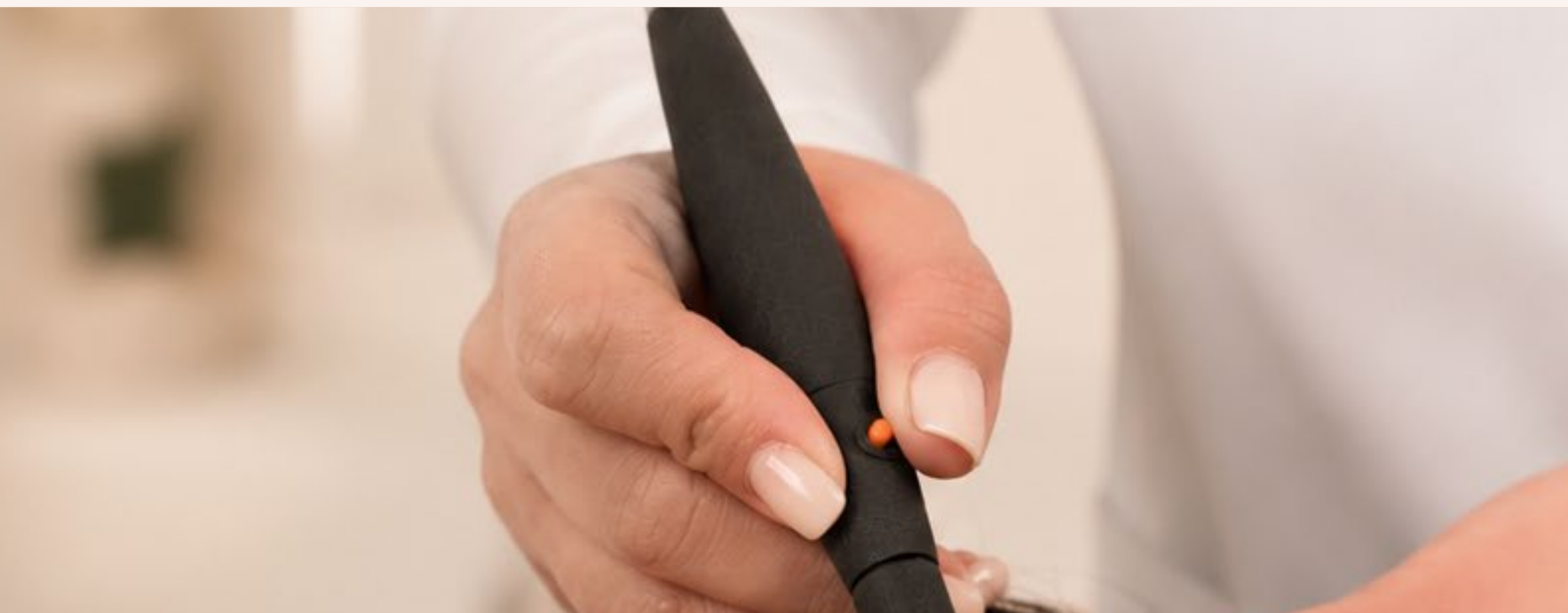

VISAGE



CORPS



TATOUAGES



POILS
HORMONAUX



POILS RÉSIDUELS
APRÈS LASER



DECALEA

ELEVA

Les accessoires



AC0661
Power cable



AC0669
Handpiece cable



AC0668
Foot pedal



AC0667K
Needle holder handle



AC0672
Electrode



AC0628K
Needle holder handle with button



AC0665
Electrode cable



AC0710
Tablet

ELEVA

Les données techniques

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230 V – 50/60 Hz

Poids net : 204 kg

Fusibles : 2 x 500 mA T

Consommation maximale : 30 W

Puissance de sortie maximale Fonction BLEND : 210 Vpp – 2,8 MHz

Puissance de sortie maximale Fonction FLASH : 210 Vpp – 2,7 MHz

Dimensions : 29x20,9x26 cm

Hauteur avec chariot : 95 cm

Minuterie : 0 à 99 minutes

Classe de protection : Classe I



| Nous contacter

 04 23 32 42 60

 [distribution_sg.professionne](#)

 [www.distribution-sg.fr](#)

 [sg_development.distributio](#)