



SG DEVELOPMENT & DISTRIBUTION

Votre partenaire en Solutions
Médico-Esthétiques.
Développez votre expertise

**BROCHURE
Q SWITCHED**
Détatouage & Carbon peel

L'utilisation



Une machine laser qui effectue le détatouage et le carbon peel.

Équipement médico-esthétique utilisé en institut et en dermatologie pour enlever les tatouages et améliorer l'apparence de la peau.

Cette machine utilise un laser pour cibler les pigments de couleur dans la peau et en fragments plus petits qui peuvent être éliminés par le système immunitaire du corps.

CARBON PEEL

DÉTATOUAGE


RÉJUVENATION DE LA PEAU



Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- **Machine**
Q switched / Nd yag
- **Longueurs d'onde**
1064nm, 532nm, 1320nm
- **Énergie maximale**
1-1000 mj
- **Largeur d'impulsion**
< 10 ns
- **Certification**
Dispositif médical MDD
(-93/43/CEE)
- **Poids**
17 Kg
- **Fréquence de répétition**
1-10Hz ajustable
- **Tension**
230 V/ 110 V $\pm$ 10 %,
50/60 $\pm$ 1 Hz
- **Environnement température**
5 degrés ~~~ 40 degrés
- **Relatif humidité**
<70%
- **Système de refroidissement**
L'eau de circulation installée
à l'intérieur + air de
refroidissement

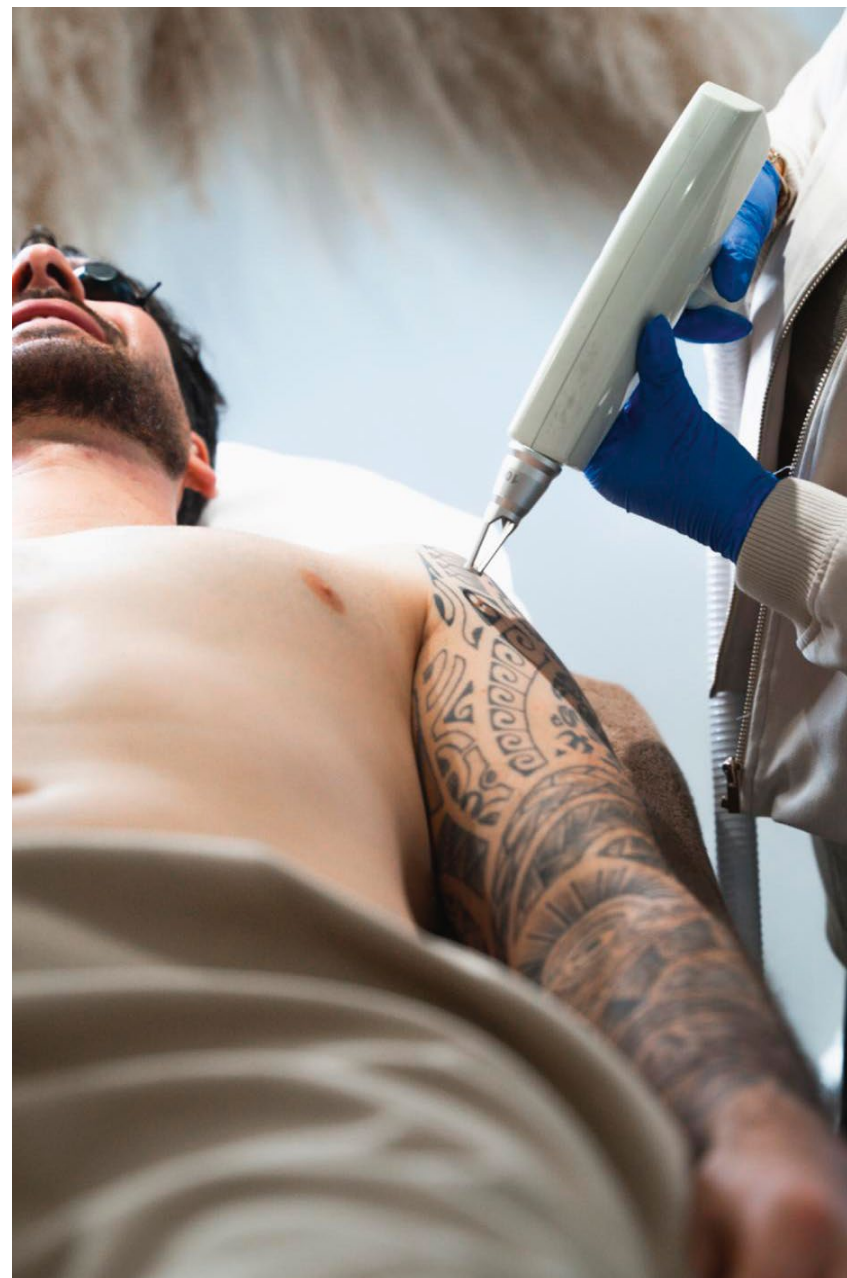




| Le détatouage



“
Un choix
primordial
pour un
déstatouage
efficace

Pour le détatouage, la machine laser émet des **impulsions lumineuses de haute énergie** qui sont absorbées sélectivement par les pigments de couleur du tatouage, ce qui les **fragmente en particules plus petites**. Ces particules sont ensuite **éliminées par le corps** à travers le système lymphatique, ce qui permet de **réduire progressivement la visibilité** du tatouage.

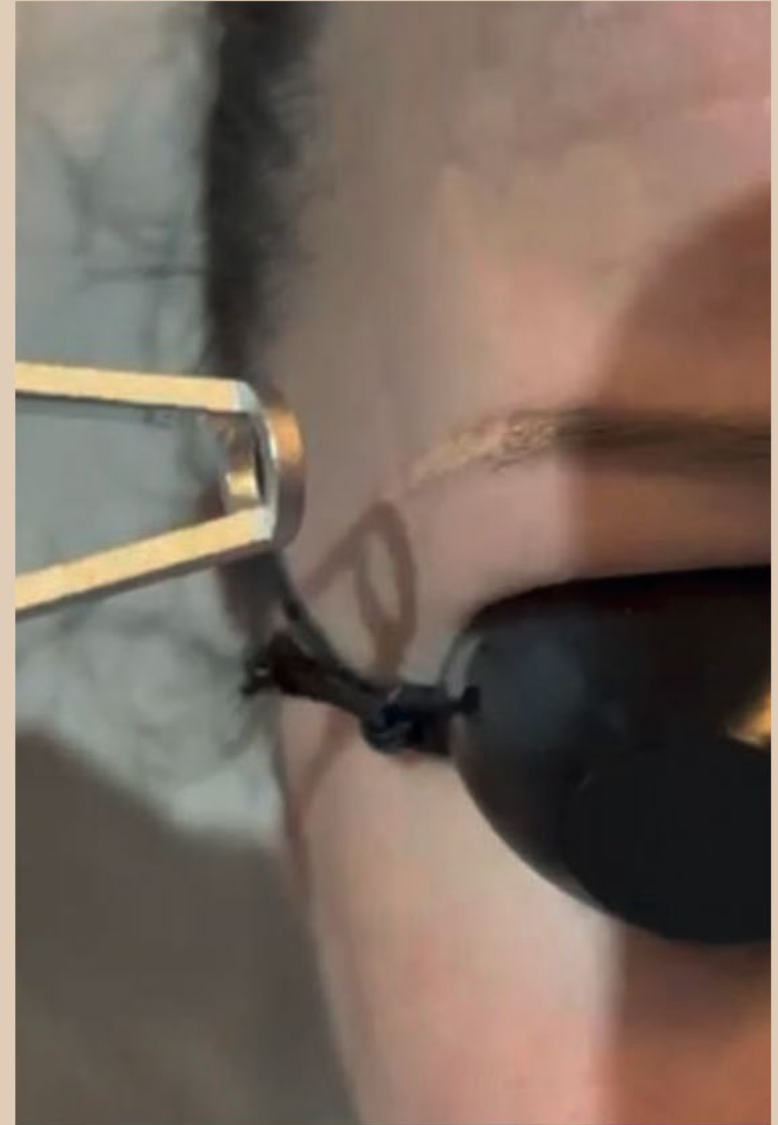

Contenu et emballage

Le contenu du colis



- 1 pièce à main
- Embouts 1320nm-1064nm et 532nm
- Lunettes de protection
- Oeil google
- 6 entonnoirs à eau
- Vanne d'entrée d'air filtre
- Serrure d'entrée
- Mode d'emploi en français
- Pédale
- Cordon d'alimentation fusibles
- Pointe laser
- Connecteur de serrure d'entrée
- Clés
- Tournevis
- Fusibles

Caisse de transport

Boîtier international en aluminium avec mousse d'amortissement à l'intérieur.



A propos



Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience dans les nombreuses expatriations de la fondatrice

Continuer à transmettre et former sur le développement de Société. Faire travailler des startups sur l'innovation des machines médico esthétiques. Rester proche de mes partenaires professionnels et, valoriser la satisfaction client. Continuer d'animer sur les réseaux sous forme d'Afterwork mensuel d'échanges de professionnels de la beauté et du bien-être afin de promouvoir l'importance de travailler en équipe tout en restant indépendante.



| Nous contacter

 04 23 32 42 60

 distribution_sg.professionnel

 www.distribution-sg.ch

 sg_development.distribution