



SG DISTRIBUTION & DEVELOPMENT

Institut de beauté, centre de formation
et fournisseur

**FICHE TECHNIQUE
MACHINE RF MICRONEEDLING
FRACTIONNÉE**



| L'utilisation



Le microneedling est un traitement cosmétique qui consiste à utiliser de petites aiguilles pour perforer la peau.


Ces micro-perforations stimulent le processus de guérison naturel du corps, ce qui entraîne une production accrue de collagène et d'élastine, les deux protéines essentielles pour maintenir la fermeté, l'élasticité et la jeunesse de la peau. Le microneedling peut être utilisé pour traiter divers problèmes de peau, tels que les rides, les cicatrices d'acné, les vergetures, l'hyperpigmentation et le relâchement cutané. En stimulant la régénération de la peau, le microneedling peut améliorer la texture, la fermeté et l'apparence générale de la peau.



—
Soin de la
peau



—
Réjuvenation
de la peau

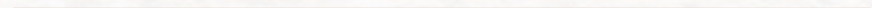



| Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- **Nom du produit**

Machine RF Microneedling fractionnée

- **Fréquence RF**

2 MHZ-4 MHZ

- **Niveau d'aspiration**

2 niveaux

- **Profondeur**

0,2-3,5 mm

- **Pièces à main**

Pièce à main Led , pièce à main Microaiguille / microélectronique, pièce à main marteau à glace, pièce à main fractionnée RF

Têtes de cristal de traitement par micro-aiguilles et têtes de cristal de traitement microélectronique

- **Aiguilles**

10 broches, 25 broches, 64 broches, pas de broches

- **Langue**

Français/anglais





Taitement

Qui est le bon candidat ?



Veillessement
de la peau




Relachement
de la peau



Pores dilatés



Vergetures

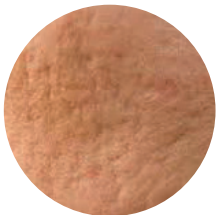

Cicatrices d'acné



Hyperpigmentation

| En savoir plus



Pourquoi ?


Le microneedling est souvent utilisé pour traiter les rides, les cicatrices d'acné, les vergetures et l'hyperpigmentation.

Comment?

En créant des micro-lésions contrôlées dans la peau, le traitement favorise la régénération cellulaire et améliore la texture et la fermeté de la peau. De plus, en ouvrant de micro-canaux dans la peau, le microneedling peut également améliorer l'absorption des produits topiques, tels que les sérums et les crèmes, ce qui peut renforcer les bienfaits du traitement.

La procédure

La technique peut être réalisée en cabinet médical ou esthétique par un professionnel qualifié. Elle commence par l'application d'un gel anesthésiant pour minimiser l'inconfort pendant le traitement. Ensuite, un appareil doté de fines aiguilles est doucement passé sur la peau, créant de minuscules perforations. La durée de la procédure peut varier en fonction de la zone traitée et de la condition de la peau.

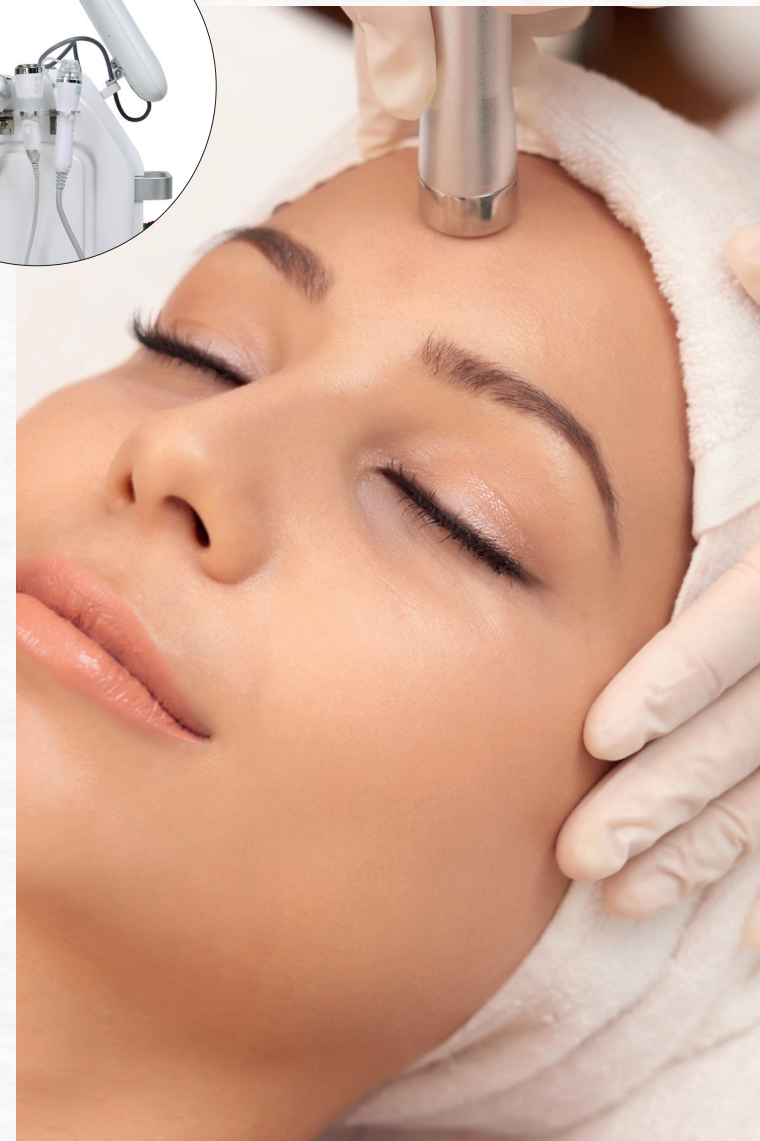

| En savoir plus



Post-traitement


Après le traitement, il est normal de ressentir une légère irritation de la peau, qui peut durer quelques jours. Il est important de suivre les recommandations du professionnel de la santé ou de l'esthéticien pour prendre soin de la peau après le microneedling.

Durabilité

Bien que le microneedling puisse offrir des résultats visibles, plusieurs séances espacées sont souvent recommandées pour obtenir des effets optimaux. Il convient de noter que le microneedling n'est pas adapté à tout le monde, notamment aux personnes ayant des affections cutanées actives, une peau très sensible ou des antécédents de cicatrisation anormale.

Conclusion

Le microneedling est une procédure cosmétique prometteuse qui peut aider à améliorer la qualité de la peau en stimulant le processus naturel de régénération. Avant de subir un microneedling, il est essentiel de consulter un professionnel pour déterminer si cette procédure est adaptée à chacun.

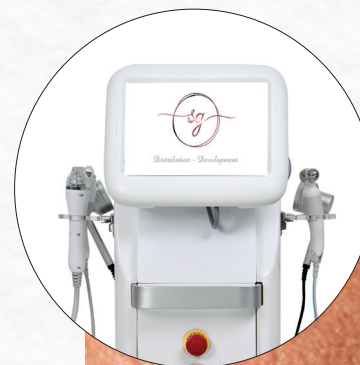

| A propos




Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience grâce à de nombreuses expatriations, la fondatrice a une vision claire.


Elle souhaite continuer à transmettre et former sur le développement de la société, tout en travaillant avec des startups pour innover dans le domaine des machines médico-esthétiques. Proche de ses partenaires professionnels, elle vise à valoriser la satisfaction client. Visionnaire dans l'âme, la fondatrice apporte un service supplémentaire aux instituts de beauté et professionnels de la santé en collaborant avec des startups et des constructeurs pour mettre en service des appareils médicaux esthétiques et produire des produits consommables **végans respectueux de l'environnement.**





| Nous contacter

  +33 7 81 39 76 66

 +41 79 530 11 14

 www.distribution-sg.ch

 [sg_development.distribution](https://www.instagram.com/sg_development.distribution)

 [sg_developmentdistribution](https://www.facebook.com/sg_developmentdistribution)