



SG DISTRIBUTION & DEVELOPMENT

Institut de beauté, centre de formation
et fournisseur

FICHE TECHNIQUE
MACHINE PICO SECOND / ND YAG
CARBON PEEL & DETATOUAGE

| L'utilisation



Une machine laser qui effectue le détatouage et le Carbon Peel

Équipement médico-esthétique utilisé en institut et en dermatologie pour enlever les tatouages et améliorer l'apparence de la peau. Cette machine utilise un laser pour cibler les pigments de couleur dans la peau et en fragments plus petits qui peuvent être éliminés par le système immunitaire du corps.



Carbon peel



Réjuvenation de la peau



Détatouage



| Paramètres

Spécifications techniques de la machine

- **Nom du produit**
Q: switched Nd : YAG laser
- **Longueurs d'onde**
1064nm, 532nm, 1320nm
- **Energie maximale**
1-1000 mj
- **Largeur d'impulsion**
< 10 ns
- **Fréquence de répétition**
1-10Hz ajustable
- **Tension**
230 V/ 110 V \pm 10 %, 50/60 \pm 1 Hz
- **Environnement température**
5 degrés ~~~ 40 degrés
- **Relatif humidité**
<70%
- **Système de refroidissement**
L'eau de circulation installée à l'intérieur + air de refroidissement
- **Poids**
17kg



| Paramètres

Caractéristiques des pièces

- Longueurs d'onde laser
1064nm, 532nm, 1320nm
- Largeur d'impulsion
< 10ns
- Fréquence de répétition
1-10 Hz réglable

- Système de refroidissement
- Niveau de refroidissement
- Garantie 2 ans
- SAV 10 ans





| Contenu et emballage

Le contenu du colis



- 1 pièce à main
- Embouts 1320nm-1064nm et 532nm
- Lunettes de protection
- Oeil google
- 6 entonnoirs à eau
- Vanne d'entrée d'air filtre
- Serrure d'entrée
- Mode d'emploi en français
- Pédale
- Cordon d'alimentation fusibles
- Pointe laser
- Connecteur de serrure d'entrée
- Clés
- Tournevis
- Fusibles

Caisse de transport

Boîtier international en aluminium avec mousse d'amortissement à l'intérieur.



| Le détatouage



Pour le détatouage, la machine laser émet des **impulsions lumineuses de haute énergie** qui sont absorbées sélectivement par les pigments de couleur du tatouage, **ce qui les fragmente en particules plus petites**. Ces particules sont ensuite éliminées par le corps à travers le système lymphatique, ce qui permet de **réduire progressivement la visibilité du tatouage**.

“

Un choix primordial pour un détatouage efficace



| A propos



Animée par la passion du développement dans le secteur de la beauté et riche d'expérience dans les nombreuses expatriations de la fondatrice.

Continuer à transmettre et former sur le développement de Société. Faire travailler des startups sur l'innovation des machines médico esthétiques. Rester proche de mes partenaires professionnels et, valoriser la satisfaction client. Continuer d'animer sur les réseaux sous forme d'Afterwork mensuel d'échanges de professionnels de la beauté et du bien-être afin de promouvoir l'importance de travailler en équipe tout en restant indépendante.



| Nous contacter

  +33 7 81 39 76 66

 +41 79 530 11 14

 www.distribution-sg.ch

 [sg_development.distribution](https://www.instagram.com/sg_development.distribution)

 [sg_developmentdistribution](https://www.facebook.com/sg_developmentdistribution)